

# 혈구분석 & 생화학 분석 시료 채취방법

옵티팜 솔루션

-이현정-

# 혈구분석 & 생화학 분석 시료 채취방법

## 혈구 검사

- 혈구검사 : EDTA, Heparin tube 이용하여 용혈되지 않게 3 ~ 5 ml 정도 채혈하여 EDTA, Heparin (항응고제) 이 혈액과 잘 섞이도록 1min 정도 흔든 후 냉장상태 24시간 안에 검사를 진행 한다.

## 생화학 검사

- 혈액 생화학 검사 : EDTA, Heparin이 처리되지 않은 tube, 주사기를 이용하여 5ml 용혈 되지 않게 채혈한다. 3000rpm 원심하여 상층액 혈청부위를 검사 시료로 사용한다.