


양계 혈청검사용 가검물의 채취요령

혈 청 검 사 팀

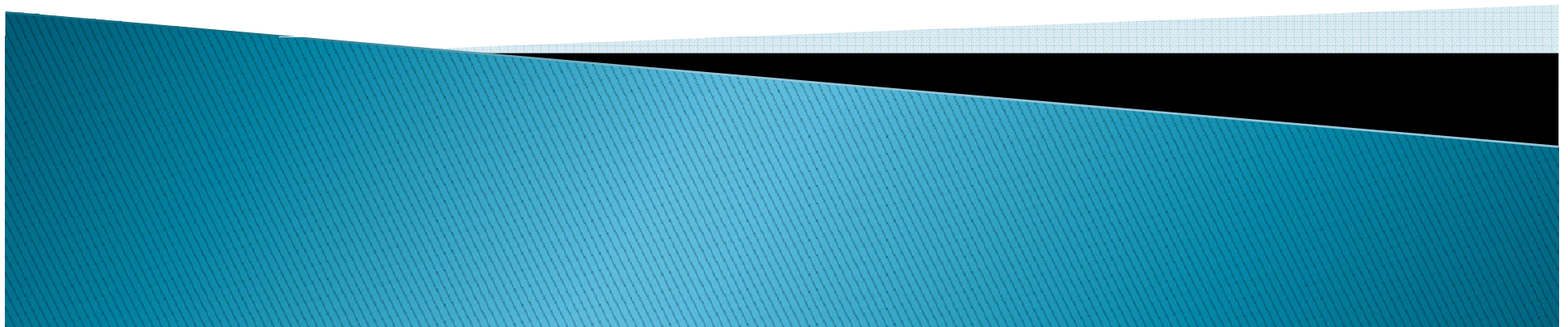

양계 혈청검사용 가검물의 채취요령

- ▶ **혈청검사용 가검물**은 대상계군의 0.5%~1% 로부터 채취하도록 하며 최소한 30수의 혈청을 실험실에 송부하도록 권장하고 있다. 그러나 채혈상의 어려움을 고려하여 **한 계군에서 10수씩 채혈하고 있는 것이 보통이다.** 시판되고 있는 플라스틱주사기(1회용 5ml)로 **익하정맥으로부터 혈액 3ml를 무균적으로 채취, 한시간 가량 정치**하여 둔다. 여름철이면 아무데나 두어도 혈청분리가 용이하지만 겨울철이면 난로가나 따듯한 방바닥 위에 놓아 두어야 한다. 일단 **혈청이 분리되면 냉장고(4°C)에 보관**하거나 곧 바로 주사기째 실험실로 송부하여야 한다. **4°C 냉장실에 보관하더라도 세균이 증식하여 변패되기 쉬우므로 2일을 넘기지 않도록 유의해야 한다.** 또한 혈액을 채취할 때도 세심한 배려를 하여야 한다. 즉 10여개의 샘플이 한 계군을 대표하는 것이기 때문에 여러군에서 채혈하여야 하기 때문이다